

# Komfort-Pflegesessel VIANDO+

Betriebsanleitung  
Garantiebedingungen



MADE  
IN  
GERMANY

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Komfort-Sessel **VIANDO+**.

Sie haben eine gute Wahl getroffen und sich für ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“ entschieden. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles über den sicheren Betrieb, die Funktionen und das Zubehör des Sessels **VIANDO+**.

Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch und bewahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig auf, sie ist Bestandteil Ihres Kaufvertrages.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem **VIANDO+**.

Ihr Team von KRANICHcare

## Inhaltsverzeichnis

1.	Inbetriebnahme	4
2.	Akku-Betrieb	4
3.	Mechanische Funktionen	5
	3.1 manuelle Variante	5
	3.2 motorische Variante	5
	3.3 motorische Variante mit Aufstehhilfe	6
4.	Armlehnen abnehmbar (Steckprinzip)	7
5.	Kopfteil abnehmbar (Steckprinzip)	7
6.	Kopfteil höhenverstellbar	7
7.	Ohrenbacken entfernen/aufstecken	8
8.	Fußteil ausklappen	8
9.	Bodenrollen	8
10.	Sitzkissen/Sitzkissenbezug	9
11.	Funktionskissen	9
12.	Nackenkissen	9
13.	Multifunktions-Keilkissen	9
14.	Abpolsterungskissen 2er-Set	10
15.	Seitliche Utensilien-Tasche	10
16.	Tablett-Tisch	10
17.	Armlehnen-Erhöhung	10
18.	Halterung für Infusionsständer	10
19.	Infusionsständer	11
20.	Pflegehinweise	11
21.	Technische Daten	11
22.	Sicherheitshinweise	12
23.	Entsorgung	13
24.	Garantie und Gewährleistung	13

## 1. Inbetriebnahme

Bitte achten Sie beim Aufstellen des Ruhesessels auf eine waagerechte Ausrichtung.

Vergewissern Sie sich, dass vor und hinter dem Sessel ausreichend Raum für das Ausfahren der Beinauflage und das Absenken der Rückenlehne ist.

Haben Sie einen Sessel mit manueller Verstellbarkeit gewählt, gehen Sie bitte zu Punkt 3.1.

Der Sessel **VIANDO+** mit motorischer Verstellbarkeit benötigt eine Verbindung zum Stromnetz. Bitte stecken Sie hierfür das Kabel vom Transformator in die Buchse an der Rückseite des Sessels. Danach verbinden Sie das Netzkabel mit dem Trafo. Stecken Sie jetzt den Netzstecker der Spannungsversorgung in eine Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz).

Vor der ersten Nutzung des Akkus muss dieser 4-5 Stunden durchgängig aufgeladen werden. Die motorischen Funktionen des Sessels dürfen während der Ladezeit nicht genutzt werden.

## 2. Akku-Betrieb

Das Aufladen:

- Sobald beim Verfahren des Sessels ein Signalton ertönt, ist der Ladeadapter an die dafür vorgesehene Ladebuchse anzuschließen.
- Der Ladevorgang läuft, wenn die Ladeanzeige am Ladegerät **rot** aufleuchtet.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Ladeanzeige am Ladegerät auf **grün** wechselt.
- Der Ladevorgang dauert in der Regel ca. 4 bis 5 Stunden. In dieser Zeit dürfen die motorischen Funktionen nicht benutzt werden.
- Um die maximale Aufladung des Akkus zu gewährleisten, ist eine Unterbrechung des Ladevorganges zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Akku erst neu aufzuladen, wenn der entsprechende Signalton beim Verfahren des Sessels ertönt.

**ACHTUNG:** Die oben genannten Anleitungen und Hinweise sind ein Auszug der vom Hersteller übergebenen Bedienungsanleitung. Die komplette Bedienungsanleitung mit Hinweisen zur Nutzung, Reinigung und Pflege können Sie gerne bei uns anfordern.

## 3. Mechanische Funktionen

### 3.1 manuelle Variante

Rückenlehne:

Zum Verstellen der Rückenlehne ziehen Sie den Auslösegriff an der Außenseite der Armlehne und halten ihn fest. Durch Körperverlagerung und leichten Druck gegen die Rückenlehne können Sie die gewünschte Neigung einstellen. Durch Loslassen des Griffes wird die Rückenlehne stufenlos, in jeder gewünschten Position, fixiert. Durch erneutes Ziehen des Auslösegriffes und gleichzeitiges Aufrichten des Körpers, wird die Rückenlehne zurück in die Grundposition gestellt.

Beinauflage:

Die Beinauflage wird durch Auslösen des Hebels, rechts zwischen Sitz und Armlehne, gleichzeitiger Verlagerung des Körpers und leichten Druck der Schultern gegen die Rückenlehne ausgeklappt. Zum Einfahren der Beinauflage beugen Sie den Oberkörper ein wenig vor, geben etwas Druck mit den Unterschenkeln auf die Beinauflage und ziehen sich an den Armlehnen leicht nach vorne.

### 3.2 motorische Variante

Diese Ausstattungsvariante verfügt über zwei voneinander unabhängige motorische Funktionen. Die Beinauflage kann motorisch aus- und eingefahren werden, und die Rückenlehne kann motorisch abgesenkt werden. Diese Funktionen werden über die Fernbedienung gesteuert.





Beinauflage ausfahren:

Durch Drücken und Halten dieser Taste lässt sich die Beinauflage ausfahren. Dabei wird der Sitz etwas nach hinten/unten geneigt und die Rückenlehne etwas nach hinten bewegt.



Beinauflage einfahren



Rückenlehne absenken:

Durch Drücken und Halten dieser Taste lässt sich die Rückenlehne stufenlos absenken.



Rückenlehne aufrichten



Komfort-Taste:

Durch Drücken und Halten dieser Taste fährt die Beinauflage ein und die Rückenlehne wird aufgerichtet.

Beim Loslassen der Tasten der Fernbedienung stoppen die Funktionen und die Beinauflage und/oder die Rückenlehne bleiben in der gewünschten Position.

### 3.3 motorische Variante mit Aufstehhilfe

Die motorische Verstellbarkeit der Beinauflage und der Rückenlehnen nutzen Sie wie in Punkt 3.2 beschrieben.

Zusätzlich können Sie mithilfe der Aufstehhilfe den gesamten Sessel anheben und absenken.



Aufstehhilfe betätigen:

Durch Drücken und Halten dieser Taste hebt sich der Sessel sanft an und neigt sich leicht nach vorn. Das ermöglicht die Positionierung der Füße unter dem Körperschwerpunkt. Ein leichtes und kräfteschonendes Aufstehen ist so gewährleistet.



Aufstehhilfe absenken:

Durch Drücken und Halten dieser Taste senkt sich der Sessel sanft ab.

Beim Loslassen der Tasten der Fernbedienung stoppen die Funktionen und der Sessel bleibt in der gewählten Position.

Aus Sicherheitsgründen fährt die Beinauflage und die Rückenlehne erst in die Grundposition zurück, bevor sich der Sessel anhebt.

## 4. Armlehnen abnehmbar (Steckprinzip)

Zum Entfernen der Armlehnen stellen Sie sich neben den Sessel und fassen die Armlehne links und rechts an ihren Enden an. Ziehen Sie die Armlehne gleichmäßig und gerade nach oben. Wenn die Beschlagstäbe der Armlehne die Beschlagführung verlassen haben, können Sie die Armlehne entfernen. Nun sind Positionswechsel seitlich aus dem Sessel kräfteschonend möglich.

Zum Wiedereinstecken der Armlehne, diese etwas schräg von außen an die Beschlagführung anlegen, die Armlehne aufrichten und mit gleichmäßigen, leichten Druck bis zum Anschlag absenken.

## 5. Kopfteil abnehmbar (Steckprinzip)

Zum Abnehmen des Kopfteils stellen Sie sich hinter den Sessel, lösen Sie die 2 Feststellschrauben auf der Rückseite der Rückenlehne (nicht komplett herausdrehen) und ziehen Sie das Kopfteil gerade nach oben. Sobald die Beschlagstäbe die Beschlagführung verlassen haben, können Sie das Kopfteil entfernen. Zum Wiedereinstecken des Kopfteils die Beschlagstäbe etwas schräg von hinten an die Beschlagführung des Sessels anlegen, das Kopfteil aufrichten und mit gleichmäßigen, leichten Druck absenken. Danach die Feststellschrauben wieder handfest andrehen.

## 6. Kopfteil höhenverstellbar

Zur Höhenverstellung des Kopfteils stellen Sie sich hinter den Ruhesessel, lösen die 2 Feststellschrauben auf der Rückseite der Rückenlehne (nicht komplett

herausdrehen) und heben es auf die gewünschte Position. Zur Fixierung die Feststellschrauben wieder handfest andrehen. Zum Absenken des Kopfteils, Kopfteil am Haltegriff halten und die Feststellschrauben lösen (Achtung: oberes das Kopfteil muss gehalten werden, ansonsten fällt dieses ungebremst auf die Rückenlehne), absenken bis zur Auflage der Rückenlehne, Feststellschraube wieder handfest andrehen.

## **7. Ohrenbacken entfernen/aufstecken**

---

Zum Entfernen und wieder Aufstecken der Ohrenbacken stellen Sie sich bitte hinter den Sessel und lösen Sie die 2 Feststellschrauben auf der Rückseite der Rückenlehne (nicht komplett herausdrehen). Halten Sie das obere Rückenteil fest und heben es nach oben bis der Beschlagstab die Beschlagführung verlassen hat. Nun die Ohrenbacken in die Führungsstäbe des Kopfteils einstecken und bis zum Anschlag schieben. Danach wird das Kopfteil zusammen mit den Ohrenbacken in die Beschlagführung in der Rückenlehne wieder eingesteckt. und bis zur Auflage der Rückenlehne abgesenkt (Achtung: Schiebegriff muss zur Sessel-Rückseite zeigen). Nun die Feststellschrauben wieder handfest andrehen.

## **8. Fußteil ausklappen**

---

Diese Funktion erleichtert die Mobilität einer im Sessel sitzenden Person. Das Fußteil lässt sich ausklappen, indem Sie seitlich zwischen Fußablage-Blende und Seitenwange des Sessels greifen und die Blende nach vorne ziehen. Das Fußteil dient zum sicheren Abstellen der Füße und ist nur bedingt belastbar (Bruchgefahr). Das Fußteil darf nur in der Grundposition mit eingerasteter Fußablage genutzt werden. Bitte achten Sie vor dem Verschieben des Sessels darauf, dass das Stromkabel entfernt wurde und nicht überrollt werden kann.

## **9. Bodenrollen**

---

Die beiden vorderen Bodenrollen sind Bockrollen (ohne Drehgelenk), sie sorgen für die nötige Spurtreue. Die beiden hinteren Gelenkrollen sind mit je einem Feststeller ausgestattet. Die Feststeller dienen der Standsicherung

(nicht gewolltes eigenmächtiges Bewegen des Sessels). Das Herunterdrücken der Feststeller sichert die hinteren Rollen, der Sessel ist fixiert. Das Heraufziehen der Feststeller entschert die Rollen, der Sessel ist mobil.

## **10. Sitzkissen/Sitzkissenbezug**

---

Das Sitzkissen kann herausgenommen werden. Hierfür zwischen Fußteilblende und Sitzkissen greifen und das Kissen nach oben herausziehen. Zum wieder Einsetzen des Sitzkissens dieses auf die Sitzkissenaufgabe legen und Richtung Rückenlehne schieben. Das Sitzkissen befindet sich in der korrekten Position, wenn die auf der Unterseite befindlichen Bolzen in die vorgesehenen Öffnungen der Auflage abgesenkt sind.

Der Bezug des Sitzkissens ist abnehmbar. Hierfür den Sitz aus dem Sessel nehmen und mit der Oberseite auf eine ebene Fläche legen. Den Reißverschluss auf der Unterseite des Sitzkissens öffnen und den Bezug abnehmen.

Zum Beziehen des Sitzkissens den Bezug erst im vorderen und dann im hinteren Bereich aufziehen. Danach den Bezug mit Hilfe des Reißverschlusses schließen und das Sitzkissen wiedereinsetzen.

## **11. Funktionskissen**

---

Das Funktionskissen dient zur Unterstützung von Lordose-, Nacken und Knie-Bereich. Es kann individuell als Kopfunterstützung dienen.

## **12. Nackenkissen**

---

Das Nackenkissen kann in der Höhe angepasst werden. Mithilfe der Schlaufe mit Gegengewicht wird es in der Höhe so positioniert wie es individuell benötigt wird.

## **13. Multifunktions-Keilkissen**

---

Das Multifunktions-Kissen verringert die Sitztiefe des Sessels und ermöglicht ein aufrechteres Sitzen.

## 14. Abpolsterungskissen 2er-Set

---

Die Abpolsterungskissen helfen bei der Positionierung und Stabilisierung von Personen mit geschwächter Rumpfmuskulatur und körperlich sehr zierlichen Personen.

## 15. Seitliche Utensilien-Tasche

---

In der Utensilien-Tasche lassen sich Alltagsgegenstände unterbringen. Die Utensilien-Tasche ist abnehmbar.

## 16. Tablett-Tisch

---

Der Tablett-Tisch wird auf die Armlehnen gesteckt (Achtung: nur bei gepolsterten Armlehnen möglich). Der Tisch besteht aus farblosen Polycarbonat. Das Material ist bruchfest und hygienisch. Kratzer im Polycarbonat sind materialtypisch und nicht zu vermeiden.

## 17. Armlehnen-Erhöhung

---

Im Set sind jeweils 4 Distanzstücke mit einer Höhe von 2 cm und 3 cm enthalten. Diese können einzeln eingesetzt werden oder zusammen die Armlehnen um maximal 5 cm erhöhen.

Zur Montage die Armlehne entfernen (Kapitel 4), die Distanzstücke auf die Beschlagstäbe schieben und die Armlehne wieder aufstecken.

## 18. Halterung für Infusionsständer

---

Die aus Edelstahl bestehende Halterung ist mit 2 Schrauben an die rückseitige Armlehnen-Wange befestigt.

## 19. Infusionsständer

---

Der Infusionsständer wird in die Halterung gesteckt und durch Drehen auf dem Gewinde fixiert.

## 20. Pflegehinweise

---

Das Bezugsmaterial pflegen Sie nach den Vorgaben des jeweiligen Herstellers. Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten der Hersteller oder durch uns.

Die Bedienelemente mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Gelenke der Beschläge. Durch die regelmäßigen Bewegungsabläufe kann Metallabrieb entstehen, dieser Abrieb lässt sich leicht durch Saugen oder Wischen entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

## 21. Technische Daten

---

Motoren:

24 Volt Gleichstrom

Transformator:

Input: AC 100 - 240 Volt, 50/60Hz, max. 1,6A

Output: DC 29Volt, max. 2A

Akku:

Kennwerte/ Technische Daten:

Nominale Kapazität: 1300mAh Minimum Kapazität: 1250mAh

Akkumulatoren sind Verschleißteile mit einer begrenzten Lebensdauer.

Max. Belastung des Sessels: 130 kg

## 22. Sicherheitshinweise

---

Der Funktionssessel **VIANDO+** wird nach dem aktuellen Stand der Technik und den aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Kindern und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen, mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen dürfen die Funktionen des Sessels nur nutzen, wenn Sie beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstanden haben.

Vergewissern Sie sich vor Gebrauch der Funktionen, dass vor und hinter dem Sessel ausreichend Raum für das Ausfahren der Beinauflage und das Absenken der Rückenlehne ist. Nutzen Sie den Sessel nicht, wenn mechanische Funktionen nicht einwandfrei funktionieren, Beschädigungen am Sessel, der Mechanik oder an stromführenden Teilen sichtbar sind.

Die ausgefahrene Fußauflage und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dienen ausschließlich zur Positionierung der Beine bzw. Oberkörpers. Zweckentfremdete Nutzung und übermäßige Belastung können die Mechanik beschädigen und die Standfestigkeit des Sessels negativ beeinflussen. Wenn die Funktionen in Bewegung sind, nicht in die Mechanik, unter die Sitzfläche, Beinauflage oder oberen Rückenteil-Beschlag fassen. Achten Sie auch auf andere Personen und Haustiere.

Bei der Stromzuleitung auf Stolpergefahren und mechanische Belastungen achten. Die Stromleitung darf weder überfahren noch von der Mechanik der Aufstehhilfe gequetscht werden. Überzeugen Sie sich vor jeder Inbetriebnahme, dass die Stromleitung nicht beschädigt ist und die Steckverbindungen fest verbunden sind.

Vermeiden Sie die Überlastung der Motoren und Mechanik durch Dauerbetrieb. Die Motoren und die Mechanik können maximal 2 Minuten im Dauerbetrieb laufen. Danach benötigt das Antriebssystem eine Abkühlzeit von 18 Minuten.

Der Transformator erzeugt bei Belastung Wärme. Er darf nicht abgedeckt wer-

den und muss freistehen. Er verfügt über einen Überhitzungsschutz, der sich bei Überlastung selbstständig aktiviert und nach Abkühlung wieder deaktiviert. Reparaturen dürfen nur durch uns beauftragte und autorisierte Personen ausgeführt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden.

Bei unsachgemäßem, nicht dem Verwendungszweck entsprechenden Einsatz des Funktionssessels erlischt die Gewährleistung und der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung.

## 23. Entsorgung

---

Wir fühlen uns der Umwelt verpflichtet, daher bitten wir Sie, das wiederverwertbare Verpackungsmaterial getrennt zu entsorgen.

Nach Ablauf der Nutzung des Funktionssessels sorgen Sie bitte für eine fachgerechte Entsorgung. Das Antriebssystem Ihres motorischen Ruhesessels enthält Elektronikbauteile. Diese sind gemäß den aktuell gültigen Umweltvorschriften zu entsorgen. Hierzu erkundigen Sie sich bitte bei den kommunalen Ämtern.

## 24. Garantie und Gewährleistung

---

Über die 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung hinaus erhalten Sie als privater Kunde eine Zusatzgarantie von 3 Jahren.

Die Zusatzgarantie auf 5 Jahre gilt unter Beachtung der hier genannten Bedingungen. Die erweiterte Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren und gilt nur für Neuware. Sie erstreckt sich auf den räumlichen Geltungsbereich anwendbaren Rechts bei Abschluss des Kaufvertrages. Ein Anspruch außerhalb dieses Geltungsbereiches ist ausgeschlossen. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist wird die ergänzende 3 Jahres-Zusatzgarantie wirksam. Die Erbringung der Garantieleistung erfolgt nach Wahl des Herstellers in Form der Nachbesserung oder Neulieferung, Rücktritt, Ersatzforderungen sowie Konventionalstrafen, Schadenersatzforderungen und

Nebenkosten sind von der Garantie nicht umfasst. Für Funktionsteile, wie Beschläge, elektrische und elektronische Bauteile, Mechaniken, Drehgestelle sowie Bodenrollen und FüÙe gelten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung. Die zweijährigen gesetzlichen Gewährleistungen gelten ebenfalls für die Bezugsmaterialien.

#### Die Zusatzgarantie von 3 Jahren gilt für:

**Polsterung**

**Unterfederung**

**Gestelle und Gestellteile**

**nicht bewegliche tragende Bauteile**

Bei Schäden jeglicher Art, verursacht durch das nicht Beachten der Informationen aus der Betriebsanleitung, der Sicherheitshinweise, unsachgemäÙen Gebrauch, Nichteinhaltung wichtiger Produktinformationen und Fremdeinwirkung wird keine Haftung übernommen.

Eventuelle Mängel müssen unverzüglich gemeldet werden.

Die beanstandete Ware muss zur Begutachtung und ggf. zur Überarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Ein Anspruch auf einen Leihessel für die Zeit der Bearbeitung besteht nicht.

Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, werden beseitigt.

Im Rahmen der Garantie erbrachte Leistungen sowie Kulanzleistungen verlängern die ursprüngliche Gewährleistungszeit nicht.

Von der Garantie und Gewährleistung ausgenommen sind:

- Normale und natürliche Verschleißerscheinungen
- Verschleiß durch übermäßigen oder nicht sachgerechten Gebrauch
- Verschleißteile, wie z.B. Akku
- Veränderungen an dem Sessel, die beim Käufer durch normale oder natürliche Abnutzung entstehen
- Warentypische Produkteigenschaften
- Gewerbliche Nutzung außerhalb des privaten Wohnbereichs
- Sachfremder Umgang mit Hitze, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Pflegemitteln

- Schäden durch spitze, scharfkantige, heiÙe oder feuchte Gegenstände
- Umwelteinflüsse, wie extreme Trockenheit, Feuchtigkeit, Licht, Sonneneinstrahlung, Temperatur
- Mutwillige Zerstörung, Zweckentfremdung, Überlastung oder Unfallschäden
- UnsachgemäÙe Leistungen bzw. Änderungen durch nicht autorisierte Personen
- Schäden und Verschmutzungen durch Haustiere, Heizquellen, Witterung
- Verschmutzungen wie z.B. Körperschweiß, Körper- oder Haarpflegemittel
- alle Veränderungen durch säure-, lösungs- oder alkoholhaltige Mittel
- Verfärbungen bzw. Veränderungen durch Medikamenten (toxische Reaktionen)
- ungeeignete Reinigungs-, Reparatur- oder Nachbesserungsversuche
- Quellschäden verursacht Feuchtigkeit oder nicht entferntes Kondensat
- Verwendung von Bezugsmaterialien außerhalb unserer Kollektion
- Durch Fremdprodukte verursachte Schäden wie z.B. Dampfreiniger, nicht vom Hersteller empfohlene Imprägnier- und Pflegemittel, Jeans-Abfärbungen und Abfärbungen sonstiger nicht farbechter Textilien, Klettbänder, Gürtel, Nieten, Reißverschlüsse usw. An Bekleidung o.ä. haftende Zucker-, Säure-, Weichmacher-, Bleichmittel- oder Lösemittel- haltige Substanzen.



helfen beim helfen



KRANICHconcept GmbH  
Reinbeker Weg 48  
21465 Wentorf bei Hamburg  
t +49 (0)40 2282 127 20  
info@kranich-concept.de  
www.kranich-concept.de  
**www.kranich-care.de**